



detrox[®]

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ГИГИЕНЫ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

Detro[®] Forte



СРЕДСТВО ДЛЯ
ДЕЗИНФЕКЦИИ И
СТЕРИЛИЗАЦИИ



ОПИСАНИЕ:

- Двухкомпонентное низкотеплое средство на основе глутарового альдегида (2,0%).
- Средство содержит базовый раствор и активатор. Раствор используют после активации.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная;
- Спороцидная.

СВОЙСТВА:

- Применяется для ручного и автоматического использования механизированным способом в мое-дезинфицирующих машинах.
- Не вызывает коррозии и не портит обрабатываемые объекты из различных материалов.
- Для экспресс-контроля концентрации действующего вещества разработаны специальные тест-полоски.
- ДВУ – 15 минут, стерилизация – 90 минут

СРЕДСТВО БЕЗОПАСНО:

- для обработки эндоскопов и инструментов к ним / Рекомендации компаний-производителей (в том числе компании «Karl Storz»/ «Карл Шторц»);
- для обработки стоматологических и хирургических инструментов;
- для обработки изделий из различных материалов (стекла, различных металлов, пластика, каучука, резины и пр.);
- для обработки анестезиологического оборудования и микрохирургического инструментария.

ПРИМЕНЕНИЕ

- В раствор «ДЕТРО ФОРТЕ» / «DETRO FORTE» необходимо погружать только тщательно очищенные инструменты!
- Строго соблюдайте время экспозиции!
- После процесса инструменты удаляются из растворов и промывают стерильной водой.
- Инструменты высушиваются стерильным компрессом или полотенцем.
- При использовании в автоматизированных МДМ, пожалуйста следуйте инструкциям производителя.

Срок годности: средства – 3 года, активированных рабочих растворов – 28 суток.

ОБЪЕМ
5 Л

ISO 13485



Detro[®] ОРА

СРЕДСТВО ДЛЯ
ДЕЗИНФЕКЦИИ И
СТЕРИЛИЗАЦИИ



ОПИСАНИЕ:

- Готовое к применению низкотеплое средство на основе ортофталевого альдегида (0,55%).

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная;
- Спороцидная.

СВОЙСТВА:

- Применяется для ручного и автоматического использования механизированным способом в мое-дезинфицирующих машинах.
- Не вызывает коррозии и не портит обрабатываемые объекты из различных материалов.
- Средство не имеет запаха;
- Низколетучее, не образует вредных испарений и газов.
- Благодаря низкой летучести имеет пониженную токсичность, что обеспечивает безопасность для персонала.
- Для экспресс-контроля концентрации действующего вещества разработаны специальные тест-полоски.
- ДВУ – 5 минут, стерилизация – 30 минут

СРЕДСТВО БЕЗОПАСНО:

- для обработки эндоскопов и инструментов к ним / Рекомендации компаний-производителей (в том числе «Карл Шторц»);
- для обработки стоматологических и хирургических инструментов;
- для обработки изделий из различных материалов (стекла, различных металлов, пластика, каучука, резины и пр.);
- для обработки анестезиологического оборудования и микрохирургического инструментария.

ПРИМЕНЕНИЕ

- В раствор «ДЕТРО ОРА» / «DETRO OPA» необходимо погружать только тщательно очищенные инструменты!
- Строго соблюдайте время экспозиции!
- После процесса инструменты удаляются из растворов и промывают стерильной водой.
- Инструменты высушиваются стерильным компрессом или полотенцем.
- При использовании в автоматизированных МДМ, пожалуйста следуйте инструкциям производителя.

Срок годности: средства – 3 года, рабочих растворов – 14 суток.

ОБЪЕМ
5 Л

ISO 13485



Detro[®] Activ



Couple property
pne-cleaning disinfection



Suitable for using at
ultrasonic cleaner



Compatible for
endoscopes

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ



ОПИСАНИЕ:

- Гранулированный порошок для приготовления раствора.
- Содержит в своем составе перкарбонат натрия, ТАЕД и энзимный комплекс (содержащий смесь панкреатических и бактериальных ферментов).
- Основным активно действующим веществом является надуксусная кислота.
- Раствор рекомендуется применять после процесса активации через 10 минут.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная;
- Спороцидная.

СВОЙСТВА:

- универсальное средство
- Очистка, дезинфекция и стерилизация.
- Эффективная очистка благодаря наличию амилотических, протеолитических и липолитических ферментов.
- Срок годности средства - 2 года, рабочих растворов – 36 часов.
- Растворы средства не портят изделия медицинского назначения из различных, в том числе термолабильных материалов (включая поликарбонат, полиэтилен, полипропилен, полиамид, поливинилхлорид, полистирол и др.), кроме изготовленных из коррозионно-нестойких сталей.
- Растворы средства не фиксируют органические загрязнения на обрабатываемых изделиях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Очистка и дезинфекция поверхностей, аппаратуры и оборудования;
- Дезинфекция, совмещенная с очисткой медицинских изделий и эндоскопов;
- Обеззараживание инфицированных пищевых и медицинских отходов класса Б и В;
- Обеззараживание воздуха, систем вентиляции и кондиционирования;
- Обработка объектов пораженных плесенью;
- Обеззараживание и стрика белья;
- ДВУ эндоскопов;
- Дезинфекция и стерилизация медицинских изделий и эндоскопов.

Очистка и дезинфекция

1% = 990 мл + 10 г. АКТИВАЦИЯ 10 МИН.

концентрация 20°C - 25°C DETRO ACTIV

Использование:
Загрязненные инструменты погружают в раствор Detro Activ, приготовленный в концентрации 1 %. Время экспозиции - 20 мин.

ДВУ

2% = 980 мл + 20 г. АКТИВАЦИЯ 10 МИН.

концентрация 20°C - 25°C DETRO ACTIV

Использование:
Предварительно очищенные инструменты погружаются в раствор Detro Activ, приготовленный в концентрации 2 %. Время экспозиции ДВУ - 5 мин.

ОБЪЕМ
2,5 кг.



ISO 13485

Detro[®] Enzym

ФЕРМЕНТОСОДЕРЖАЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ И
ИЗДЕЛИЙ



ОПИСАНИЕ:

- Концентрированное низкопенное средство на основе ферментов (амилаза, липаза, протеаза, целлюлаза), неионогенных ПАВ и ЧАС.

СВОЙСТВА:

- Применяется для ручного и автоматического использования механизированным способом в моюще-дезинфицирующих машинах.
- Не вызывает коррозии и не портит обрабатываемые объекты из различных материалов.
- Высокая эффективность очистки благодаря уникальной формуле.
- Растворы средства не фиксируют органические загрязнения на обрабатываемых изделиях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты ручным способом;
- для предстерилизационной очистки хирургических и стоматологических инструментов механизированным (в том числе с применением ультразвука) способом;
- для предварительной и предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом;
- для окончательной очистки эндоскопов ручным и механизированным способом перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ).

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Рабочий раствор средства использовать однократно, в течение 24 часов.
- Средство рекомендовано для обработки эндоскопов механизированным способом в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах - репроцессорах «Detro Wash», фирмы Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş, Турция.

Срок годности: 2 года.

ОБЪЕМ

- 1 л
- 2 л
- 5 л

ISO 13485



Detro[®] cid Enzym

ФЕРМЕНТОСОДЕРЖАЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ
ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ И
ИЗДЕЛИЙ



ОПИСАНИЕ:

- Концентрированное средство содержащее в своем составе смесь панкреатических и бактериальных ферментов, смесь ЧАС, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, неионогенные ПАВ.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная.

СВОЙСТВА:

- Универсальное дезинфицирующее средство с мощным эффектом и широким спектром назначений.
- Средство хорошо смешивается с водой.
- Концентрат и рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны, экологически безвредны.
- Растворы средства не портят обрабатываемые поверхности, не обесцвечивают ткани, не фиксируют органические соединения, не вызывают коррозии металлов.
- Средство не совместимо с мылами, анионными поверхностно-активными веществами и синтетическими моющими средствами.
- Средство активно уничтожает биологические пленки грамположительных и грамотрицательных бактерий на абиотических поверхностях.
- Многократность использования рабочих растворов – в течение 30 суток.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Очистка и дезинфекция поверхностей, аппаратуры и оборудования;
- Дезинфекция, совмещенная с очисткой медицинских изделий и эндоскопов;
- Обеззараживания инфицированных пищевых и медицинских отходов класса Б и В;
- Обеззараживания воздуха, систем вентиляции и кондиционирования;
- Обработка объектов пораженных плесенью.

Срок годности: средства – 5 лет, рабочих растворов 30 суток при хранении в закрытых емкостях.

ОБЪЕМ

- 1 л
- 2 л
- 5 л

ISO 13485



Detro[®] Matic A

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ РУЧНЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ В АВТОМАТИЧЕСКИХ МДМ



Detro[®] Matic NF - NS

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ КИСЛОТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ РУЧНЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ В АВТОМАТИЧЕСКИХ МДМ



Detro[®] Matic Enzym

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ РУЧНЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ В АВТОМАТИЧЕСКИХ МДМ



СОСТАВ:

Гидроксид калия, ингибитор коррозии, ПАВ

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ:

Эффективная очистка и дезинфекция;
- медицинского инструментария из металла, стекла, керамики, фарфора, пластмасс;
- лабораторного оборудования, стекла и пластика;
- санитарно-технического оборудования (раковины, унитазы, писсуары) от засорения органическими отходами.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- Химикотермическая дезинфекция термоустойчивых инструментов при 93° С;
- Эффективная очистка инструментов и материалов при 50-60° С;
- Содержит ингибитор коррозии;
- Высокоэкономичное средство при низкой концентрации рабочих растворов;
- Подходит для всех видов моюще-дезинфицирующих машин.

Концентрация рабочих растворов:

0,1% – 0,2%
(10 – 20 мл на 10 литров воды).

Срок годности: 2 года.

ОБЪЕМ

5 Л

ISO 13485



СОСТАВ:

Органические кислоты (лимонная или ортофосфорная), ингибитор коррозии, ПАВ

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Кислотная мойка поверхностей и изделий от щелочных отложений;
- Нейтрализация обработанных изделий после щелочной обработки.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- Мощная нейтрализующая способность;
- Эффективно удаляет остатки щелочных моющих средств.
- Эффективное антикоррозионное действие;
- Совместимость для всех типов машин;
- Высокоэкономичное средство при низкой концентрации рабочих растворов.

Концентрация рабочих растворов:

0,05% (5 мл на 10 литров воды).

Срок годности: 2 года.

ОБЪЕМ

5 Л

ISO 13485



СОСТАВ:

Комплекс ферментов (амилаза, липаза, протеаза, целлюлаза, декстраназа), ингибитор коррозии, ПАВ

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Высокоэффективная ферментативная очистка инструментария.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- Эффективная очистка инструментов и материалов при 70° С;
- Содержит ингибитор коррозии;
- Высокоэкономичное средство при низкой концентрации рабочих растворов;
- Подходит для всех видов моюще-дезинфицирующих машин.

Концентрация рабочих растворов:
0,5% (5 мл на 1 литр воды).

Срок годности: 2 года.

ОБЪЕМ

1 Л
2 Л
5 Л

ISO 13485



Detro[®] Lube

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



ОПИСАНИЕ:

- Средство представляет собой жидкое концентрированное средство, основным действующим веществом которого является медицинское белое масло – 70%.
- Не содержит кремния и его производных.
Средство отвечает требованиям German Pharmacopoeia (DAB 10) Pharmacopoeia Eur. 2-е издание, FDA 172.878 и FDA 178.3620 и требованиям German Federal Board of Health (BGA). Допуск NSF H1 - для возможного контакта с продуктами питания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Средство применяется:
- для обработки медицинского (хирургического и стоматологического) инструментария и эндоскопического оборудования;
- для обработки как ручным, так и механизированным способом в автоматических моющих и моюще-дезинфицирующих машинах;
- для безопасной обработки медицинских изделий из любых металлов и других материалов;
- для консервации медицинских изделий при перемещении или длительном хранении;
- для безопасного использования в качестве многофункциональной смазки в местах трения элементов производственного оборудования, используемого в пищевой промышленности.

СВОЙСТВА:

- Сервисный диапазон температур: от -20°C до +120°C.
- Устойчив к окислению.
- Антиадгезионные свойства.
- Профилактика образования биологических пленок, вследствие антиадгезивного эффекта на поверхности инструментария.
- Не нарушает процесс стерилизации и ДВУ медицинского инструментария вследствие отсутствия в своем составе кремния и его производных.
- Надёжная защита от коррозии - обеспечивает долговременный срок службы инструментов.
- Концентрированный и экономичный продукт.
- Устойчив к горячей и холодной воде, водяному пару.
- Стойкость к химическим моющим средствам.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Механизированная обработка в автоматических моющих и моюще-дезинфицирующих машинах:
- Для использования применяют 0,03% рабочий раствор (0,3 мл на 1 литр воды).
- Канистру со средством «ДЕТРО ЛУБРИКАНТ»/«DETRO LUBE» подключают дозирующему насосу МД машины или к центральной дозирующей станции с целью осуществления автоматического дозирования.
Ручная обработка:
- Для использования ручным способом применяют 0,5% рабочий раствор (5 мл на 1 л воды).

Срок годности: 3 года.

ОБЪЕМ
5 Л, 2 Л, 1 Л

ISO 13485



ISO 13485



Очистка и Дезинфекция

Akaspray Desinfektionstucher

СПИРТСОДЕРЖАЩИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ



СОСТАВ:

В качестве пропиточного состава салфеток используют раствор, содержащий изопропропиловый спирт (пропанол-2) - 20%, этиловый спирт (этанол) - 50%, NN-дидецил-N-метилполи(оксиэтил)аммоний пропионат - 0,05%

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная.

СВОЙСТВА:

- Экспресс-дезинфекция и очистка от 1 минуты.
- Высокоэффективное средство для очистки и экспресс-дезинфекции.
- Дезодорирующие свойства.
- С осторожностью применять дезинфицирующие салфетки для обработки поверхностей, восприимчивых к спиртам (например, акриловое стекло).
- Одной салфеткой можно обработать поверхность размером не более 1,0 м².

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ:

- Очистка и дезинфекции небольших по площади поверхностей, в том числе медицинских приборов (стоматологические кресла, акриловые стекла, кровати и т. д.), в кабинетах ОРИТ, стоматологических и хирургических отделениях, микробиологических и биохимических лабораториях.

Срок годности: 5 лет.

ОБЪЕМ

В банке 150 салфеток.

Detro[®] San AF

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО
ДЛЯ ЭКСПРЕСС ДЕЗИНФЕКЦИИ, НЕ
СОДЕРЖАЩЕЕ СПИРТОВ



СОСТАВ:

смесь ЧАС, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, неионогенные ПАВ.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная.

СВОЙСТВА:

- Обработка небольших по площади и труднодоступных поверхностей;
- Высокоэффективное средство для очистки и экспресс-дезинфекции.
- Активная пена, не содержащая спиртов;
- Не содержит альдегидов и фенолов
- Хорошая совместимость с чувствительными поверхностями
- Экспресс-дезинфекция – 1 минута

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ:

- Очистка и дезинфекции небольших по площади и труднодоступных поверхностей, в том числе медицинских приборов (стоматологические кресла, акриловые стекла, кровати и т. д.), в кабинетах ОРИТ, стоматологических и хирургических отделениях, микробиологических и биохимических лабораториях.
- Рекомендован для обработки кузезов.

ФОРМА ПРИМЕНЕНИЯ:

- Распылять на поверхности с расстояния 30 см.
- Протереть равномерно чистой салфеткой.
- Использовать после высыхания.

ОБЪЕМ

100 Мл
500 Мл
1 Л

ISO 13485



Detro[®] San AF Wipes

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ НЕ
СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВ



СОСТАВ:

В качестве пропиточного состава салфеток используют водный раствор, содержащий смесь ЧАС, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, неионогенные ПАВ.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная.

СВОЙСТВА:

- Обработка небольших по площади и труднодоступных поверхностей;
- Высокоэффективное средство для очистки и экспресс-дезинфекции.
- Пропиточный состав, не содержащий спиртов;
- Хорошая совместимость с чувствительными поверхностями, в том числе акриловым стеклом, натуральной кожей и пр.
- Экспресс-дезинфекция – 1 минута
- Одной салфеткой можно обработать поверхность размером не более 1,0 м².

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ:

- Очистка и дезинфекции небольших по площади и труднодоступных поверхностей, в том числе медицинских приборов (стоматологические кресла, акриловые стекла, кровати и т. д.), в кабинетах ОРИТ, стоматологических и хирургических отделениях, микробиологических и биохимических лабораториях.
- Рекомендован для обработки кузезов.

ФОРМА ПРИМЕНЕНИЯ:

- Равномерно протирать поверхности салфеткой.
- При интенсивном загрязнении повторить процедуру.

Срок годности: 5 лет.

ОБЪЕМ

В банке 150 салфеток

ISO 13485



Detro® PW %10

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
– КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК



СОСТАВ:

Повидон йод – 10,0%, увлажняющие и смягчающие кожу добавки, функциональные и технологические компоненты.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная.

СВОЙСТВА:

- Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 5 часов.
- Средство не теряет своих свойств и активности после заморозания и последующего оттаивания.
- После проведения манипуляций остаточная окраска кожи (при необходимости) легко снимается путем промывания окрашенного участка водой с мылом или протирания ватным тампоном, смоченным мыльной водой.
- Окраска белья и других тканых материалов при попадании средства легко снимается обычной стиркой с любым моющим средством.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Гигиеническая обработка рук и кожных покровов;
- Обработка рук хирургов;
- Обработка операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров;
- Обработка ступней ног;
- Обработку слизистых оболочек, при необходимости, проводить разбавленным (1/10) водным раствором средства.

Срок годности: 2 года.

ОБЪЕМ

- 100 Мл
- 500 Мл
- 1 Л
- 2 Л

ISO 13485

Detro® PW %7,5 Scrub

ЖИДКОЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ МЫЛО



СОСТАВ:

Повидон йод – 7,5%, увлажняющие и смягчающие кожу добавки, функциональные и технологические компоненты.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная.

СВОЙСТВА:

- Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов.
- Средство не теряет своих свойств и активности после заморозания и последующего оттаивания.
- После проведения манипуляций остаточная окраска кожи (при необходимости) легко снимается путем промывания окрашенного участка водой с мылом или протирания ватным тампоном, смоченным мыльной водой.
- Окраска белья и других тканых материалов при попадании средства легко снимается обычной стиркой с любым моющим средством.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Гигиеническая обработка рук и кожных покровов;
- Гигиеническое мытье рук;
- Обработка рук хирургов и оперирующего персонала;
- Обработка и гигиеническое мытье кожи операционного поля пациентов, в том числе перед установкой/введением катетеров и пункций суставов в лечебно-профилактических организациях и пр.;
- Обработка и гигиеническое мытье ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.

Срок годности: 2 года.

ОБЪЕМ

- 100 Мл
- 500 Мл
- 1 Л
- 2 Л

ISO 13485

Detro Enzym Foam

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
ФЕРМЕНТОСОДЕРЖАЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ИЗДЕЛИЙ



ОПИСАНИЕ:


- Готовое к применению средство в виде пены на основе смеси панкреатических и бактериальных ферментов, неионогенных ПАВ и ЧАС.

СВОЙСТВА:

- Применяется для ручной обработки поверхностей и медицинских изделий;
- Не вызывает коррозии и не портит обрабатываемые объекты из различных материалов;
- Высокая эффективность очистки благодаря уникальной формуле;
- Средство не фиксирует органические загрязнения на обрабатываемых изделиях.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

- Ферменты в составе средства имеют активность в отношении органических загрязнений, включающих белки, углеводы, липиды, а также специфических полисахаридов ЭПМ биопленок грамположительных и грамотрицательных бактерий.
- Специфическое действие определяется комплексным воздействием составных частей средства на любые загрязнения, включая органические и неорганические, застарелые фиксированные и свежие, в том числе трудноустраняемые обычными чистящими и моющими средствами.
- Антиадгезивный и остаточный антиадгезивный эффект.
- При распылении при помощи триггера на обрабатываемую поверхность средство образует белую пену, обладающую хорошими моющими свойствами, в том числе в отношении фиксированных органических загрязнений, высокой активностью в отношении экзополисахаридного матрикса (ЭПМ) биологических пленок, не вызывают коррозии металлов, не повреждают термолabileные

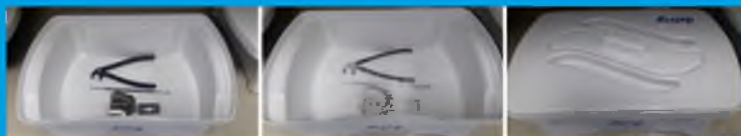

- Ферменты в составе средства имеют активность в отношении органических загрязнений, включающих белки, углеводы, липиды, а также специфических полисахаридов ЭПМ биопленок грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Срок годности: 2 года.

ОБЪЕМ
500 Мл
750 Мл
1 Л

ISO 13485



detrox[®]



detrox[®]

